


Micromotor

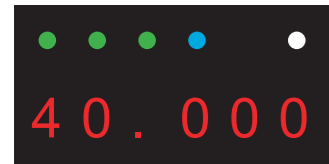

Aktivera micromotorn och reglera den med XO Fotkontroll.


Se relevant data på displayen.

Kör motorn inom 50-40 000 rpm motsols med eller medsols med .

Displayen visar maxhastigheten när fotkontrollen inte är aktiv och den faktiska hastigheten när motorn är i drift.

Ändra sprayval med : vatten & luft, bara luft eller ingen spray.

Slå på/av XO Chip Blow med (automatisk Chip Blow när motorn med aktiv spray stannat).

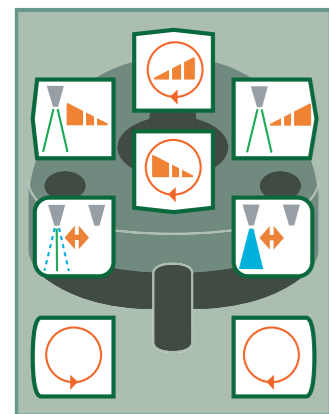

Turbin



Välj mellan tre spraynivåer:

Höj nivå med .
Sänk nivå med .

Välj mellan tre maxhastigheter:

Höj nivå med .
Sänk nivå med .

Aktivera turbinen och reglera den med XO Fotkontroll.

Se relevant data på bryggans display.

Slå på/av turbinen med eller .


Ändra sprayval med : vatten & luft eller ingen spray.

Välj mellan tre spraynivåer:
Höj nivå med .
Sänk nivå med .

Välj mellan tre maxhastigheter:

Höj nivå med .
Sänk nivå med .

Displayen visar aktuell hastighet (i % av max).

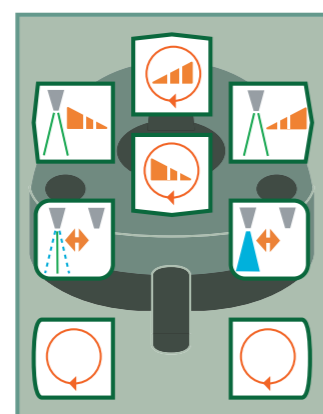

XO Chip Blow



När en mikromotor eller turbin med inkopplad sprayfunktion stannar aktiveras XO Chip Blow funktionen på den bearbetade ytan.

Slå på/av XO Chip Blow för det aktiva instrumentet med hjälp av .

Du kan slå av XO Chip Blow permanent för ett eller flera instrument. Se Configurations Guiden för mer information.

Observera att XO Chip Blow-funktionens kvalitet eventuellt påverkas av de vinkelstycken du använder.

Den vita lysdioden visar XO Chip Blow för instrumentet:

1 vit lysdiod lyser: XO Chip Blow på.

0 vita lysdioder lyser: XO Chip Blow av.

XO Osseo (enbart XO 4-6)



När XO Osseo tas fram, styrs den med XO Fotkontrollen.

Se relevanta data på displayen.

Kontrollera motorn i intervallet 100-40.000 o/m med eller mot uret med .

Se den maximala hastigheten på displayen, när fotkontrollen inte är aktiverad.

Se den aktuella hastigheten på displayen, när motorn roterar.


Anslut/avbryt kylvatten .

Välj i mellan 3 kylvatten steps:

Föröka steps med .
Sänk steps med .

Välj i mellan 3 steps av den maximala hastighet:

Föröka steps med .
Sänk steps med .

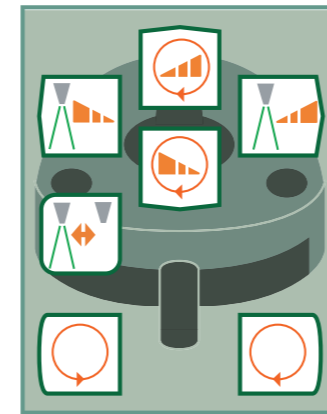

XO Odontosurge



När XO Odontosurge handstycket tas fram, styrs det med XO Fotkontrollen.

Den aktuella funktionen visas på displayen: STANDBY, CUT eller COAG.

Väljande av funktion företas med XO Fotkontrollen:


CUT: .

COAG: .

STANDBY: .

Start/stop Odontosurge med eller .


Bemärk:
Instrumentkontakten måste vara aktiverad samtidigt.

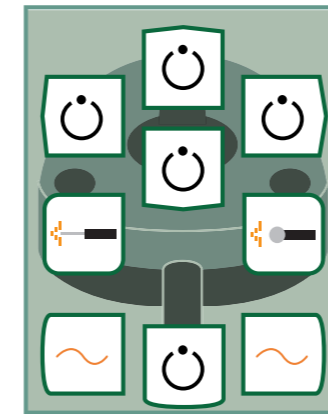

Display visning "CUT" för skärning (dissektion)



Display visning "COAG" för koagulering (haemostasis)

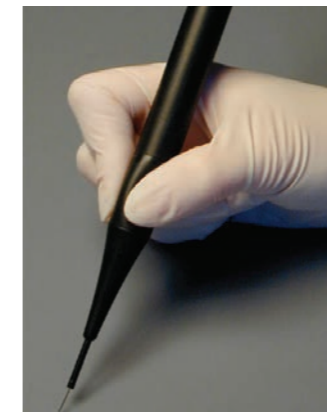

Aktivering av instrumentkontakt.

Scaler



Aktivera scalern och reglera den med XO Fotkontroll.

Se relevant data på bryggans display.

Starta/stoppa instrumentets oscillering med eller .

Slå på/av sköljningen med .

Välj mellan tre vattenmängd-nivåer:
Höj nivå med .
Sänk nivå med .

Välj mellan tre effektinställningar:
Höj nivå med .
Sänk nivå med .

Displayen visar aktuell effektinställning (i % av max).



Härdljus



Aktivera härdljuset och reglera den med XO Fotkontroll.

Kontrollera aktuell exponeringstid på displayen innan du aktiverar fotkontrollen.

Starta härdningsprocessen med eller .

Displayen visar förlöpt tid under processens gång.

Ett pip hörs var tionde sekund.

Välj mellan tre olika exponeringstider:
Höj nivå med .
Sänk nivå med .

Välg 30 sek. soft start med .

Obs! Denna funktion kan enbart användas med Lysta LCD 88 & 89.



Intraoralt videokamera





Till skillnad från resten av enhetens instrument kan du använda videokameran även när ett annat instrument är aktivt.

Lyft fram kameran för att se en videobild på en skärm.

Styr videokameran via fotkontrollen så länge inga andra instrument är aktiva.

Växla mellan lägena "still" och "live" med hjälp av .

Obs! Funktionen "still" kräver installation av programvara på ansluten PC.

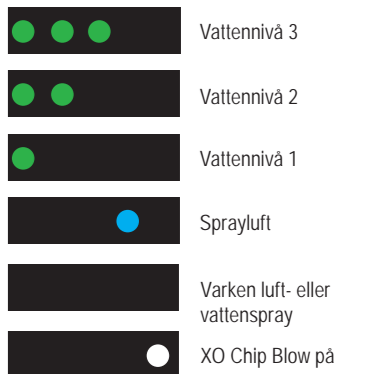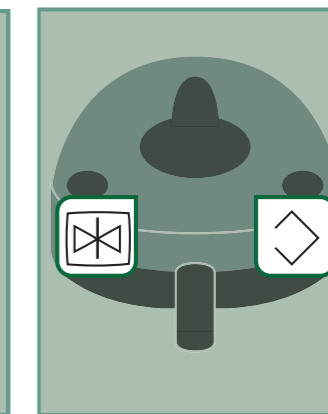

- Påbörja rotation medsols
- Påbörja rotation motsols
- Sprayval
- Slå på/av XO Chip Blow
- Öka vattenmängd/sköljning
- Minska vattenmängd/sköljning
- Öka maxhastigheten
- Sänk maxhastigheten
- Slå på/av scalern/Odontosurge
- Slå på/av sköljning
- Höj effekten - scalern
- Minska effekten - scalern
- Slå på härdljuset
- Öka exponeringstiden - härdljuset
- Minska exponeringstiden - härdljuset
- Soft start / härdljuset 30 sekunder
- Växla mellan "still-/live"-bild - videokameran
- Spara "stillbilder" i minnet - videokameran

Underhåll

Infektionkontrollrutiner

Om XO Fotkontroll glider på golvet når den aktiveras:
Rengör gummiføtterne under fotkontrollen med kemiskt ren bensin.

OBS:
Efter desinficering av instrumentbordets ytor måste ytorna vara helt torra innan gummi skyddet återplaceras.



OBS:
Om instrument slangarna har varit avmonterade, måste anslutningarna vara helt torra innan slangarna monterats fast igen.



På morgonen innan första patienten

- Slutför desinfektionsproceduren för vattenledningarna:
 - Kontrollera att alla instrument fortfarande sitter i fontänens instrumenthållare
 - Slå på uniten
 - Unitens vattenledningar spolas automatiskt med desinfektionsvätska
 - Se status på displayen

- Sätt på steril(-a) desinfikerad(-e)/ny(-a):
 - Instrumentpanel
 - Instrument
 - Kopp
 - Handtag på instrumentbrygga, lampa och skärm
 - Sugfilter och skydd för sugnippel

Efter varje patient

- Avlägsna kontaminerad(-e):
 - Instrumentpanel
 - Instrument
 - Kopp
 - Handtag på instrumentbrygga, lampa och skärm

- Rengör och desinfektera ytorna

- Sätt i steril(a)/desinfikerad(e)/ny(a):
 - Instrumentpanel
 - Enhetsinstrument
 - Kopp
 - Handtag på instrumentbrygga, lampa och skärm

På kvällen efter den sista patienten

- Desinfektera sugsystemet:
 - Aktivera
 - Sätt på båda sugslangarna på desinfektionsnippelarna
 - Aktivera
 - Se statusen på displayen
- Avlägsna kontaminerad(-e):
 - Instrumentpanel
 - Instrument
 - Fontänskål, "guldfång" och kopphållare (vrid undan fontänkranen innan du flyttar fontänskålen)
 - Handtag på instrumentbrygga, lampa och skärm
 - Sugfilter och skydd för sugnippel

- Rengör och desinfektera unit- och stolsytor

- Sätt i desinfikerad:
 - Fontänskål, "guldfång" och vattenglaspåfyllaren (när du har placerat fontänskålen vrider du tillbaka fontänkranen till dess rätta position)

- Starta desinfektionsproceduren för vattenledningarna:
 - Placera alla enhetens instrument i fontänens instrumenthållare
 - Tryck på för att tömma expansionsbehållaren
 - Slå av enheten och låt alla instrument sitta kvar i fontänens instrumenthållare



Desinfektering av vattenledningar.




Sugslangar på desinfektionsnippel



Fontänskålen är löstagbar för att kunna diskas.



XO 4-delar som kan autoklaveras (+134°C)

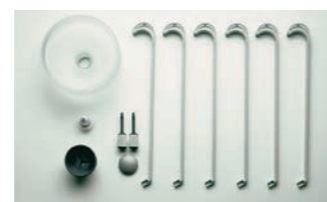

Delar som kan rengöras i diskdesinfektor.



Rengör gummiføtterne under XO Fotkontroll regelbundet med kemiskt ren bensin.

XO CARE A/S
Usserød Mølle
Håndværkersvinget 6
DK 2970 Hørsholm
Denmark

Tel +45 70 20 55 11
info@xo-care.com
www.xo-care.com



XO® 4-2 / XO® 4-6 Quick Guide

Slå på/av din XO 4 med hjælp av den grønne strøm-brytaren på stativets baksida.

När ett av unitens instrument aktiveras reglerar du det med hjälp av XO Fotkontroll, se nästa sida.

När alla instrument är på plats styr XO Fotkontroll och XO Joystick stol och unit. Vissa funktioner styrs antingen automatiskt eller manuellt.

Fontänen startar automatiskt när vattenglaspåfyllaren stannar och när stolen når sköljpositionen.

Starta fontänsköljningen manuellt med hjälp av .

Aktivera vattenglaspåfyllaren under kortare tid än 1 sekund fylls glaset med den förinställda mängden vatten. Aktivera en gång till under kortare tid än 1 sekund om du vill avbryta den automatiska påfyllningen.



Knapparna och .

Om aktiveras under längre tid än 1 sekund fylls vatten i koppen så länge som knappen hålls intryckt. Samma funktioner finns tillgängliga på XO Fotkontroll och är därmed även åtkomliga för tandsköterskan.

Sugen startar automatiskt när slangarna lyfts från sughållaren.

XO 4-lampan slås på automatiskt när stolen når position 1, 2 eller "last position". Lampan slås av när stolen flyttas mot skölj- eller i/urstigningsposition. Styr lampan via sensorn under lamphuvudet utan att du behöver vidröra den: Håll handen inom aktiveringsområdet i mindre än en sekund för att slå på/av lampan. Håll kvar handen längre än en sekund för att justera ljusstyrkan.

Använd för att **kalla på din assistent**.



"No touch"-sensor.

Stol och unit

Flytta **XO 4-stolen** till position 1 med och till position 2 med .


Stolen går till sköljposition när aktiveras första gången.

Stolen går till i/urstigningsposition när aktiveras andra gången.


Om aktiveras två gånger inom en sekund går stolen direkt till i/urstigningsposition.

Gå till "last position" med hjälp av .

Blås upp/töm korsryggstödet med hjälp av eller använd fjärrkontrollen.

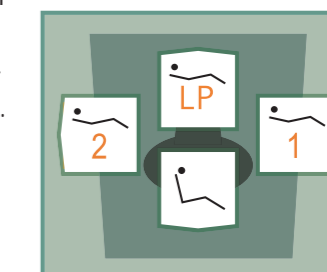

XO Joystick på stolbasen.

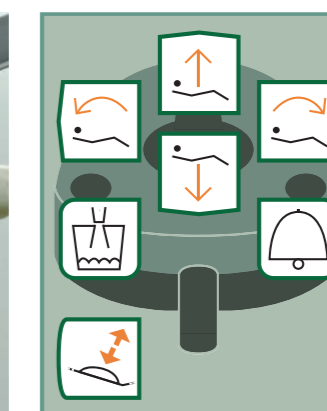

XO Fotkontroll.

Stolens nödstopp: Vidrör valfri knapp (förutom) på XO Fotkontroll eller XO Joystick för att omedelbart stoppa stolen.

Justera korsryggstödet med . Första gången aktiveras ökas stödet för korsryggen. Om aktiveras en gång till, minskas korsryggstödet. Patienten kan själv justera korsryggstödet med hjälp av fjärrkontrollen.

- Arbetsposition 1
- Arbetsposition 2
- En gång: sköljposition
Två gånger: i/urstigningsposition
- "Last position"
- Høj stolen
- Sank stolen
- Høj ryggstödet
- Sank ryggstödet
- Starta/stoppa vattenglas-påfyllaren
- Kalla på din assistent.
- Blås upp/töm korsryggstödet
- Starta/stoppa rundspolning